

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
17 beta œstradiol	Plasma	Héparine gélósé	Préciser le jour du cycle chez la femme et le contexte	Du Lundi au samedi	<8h
17OH Progesterone	sérum	Sérum	Congelé sur site analytique, prélèvement le matin impérativement et à distance de la prise de corticoïdes, de préférence 1ère partie du cycle Attention si enfant < 1 an: envoi EUROFINS pour technique RIA	Mardi	<8h
ACE	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Acide folique (Vit B9) (Folates)	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict	Du lundi au samedi	<8h
Acide urique	urine	Urines	A jeun non strict	Du lundi au samedi	≤2h à T°C ambiante
Acide urique	Plasma	Héparine gélósé	A jeun non strict	24h / 24h	<8h
Acide valproïque (dépakine)	Plasma	Héparine gélósé	Avant prise de médicament (noter heure de dernière prise+ posologie)/ Pour Lab'Ouest 44: 2-8°C	24h / 24h	<8h
ACTH	Plasma	EDTA	Prélever au laboratoire, le matin (7h-10h) Plasma à congeler <1h, avec centrifugation à +4°C et tubes EDTA préalablement mis au frigo. En l'absence de centrifugeuse +4 : utiliser des tubes EDTA Aprotinine.	Lundi	NA
AFP	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
ALAT : SGPT	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Albumine	Plasma	Héparine gélósé	A jeun non strict	24h / 24h	<8h
Albuminurie dosage, microalbuminurie	urine	Urines	Urines 24h ou échantillon (préférentiellement 2ème miction du jour) conservé entre +2 et +8° C	24h / 24h	<8h
Alcool	Plasma	Fluoré	Pas de désinfection à l'alcool du point de prélèvement	24h / 24h	<8h
Aldostérone	Plasma	EDTA	Plasma à congeler < 6h, préciser si position couchée ou debout (depuis au moins 30min) avant le prélèvement. Prélèvement le matin entre 7h et 10h.	Lundi	<4h
Allergènes et mélanges (fx)	sérum	Sérum	Température ambiante, cf onglet Allergologie	du Lundi au Vendredi	<8h
AMH	ŪPlasma	Héparine gélósé	Préciser le jour du cycle chez la femme et le contexte (SOPK?) Température ambiante	Du lundi au samedi	<8h
Amphétamines	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ŪContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
ANTI Xa (HBPM)	Plasma	Citrate	A congeler dans les 4h (double centrifugation) Préciser traitement anticoagulant, posologie et heure d'injection	24h / 24h	<2h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
ANTI Xa (HNF)	Plasma	Citrate	A congeler dans les 4h (double centrifugation) Préciser traitement anticoagulant, posologie et heure d'injection *En cas de traitement par héparine NF (Calciparine...) ou NACO (Pradaxa, Xarelto...) : contacter le laboratoire	24h / 24h	<2h
Anticoagulants circulants / Recherche d'ACC	Plasma	Citrate	A congeler dans les 4h (double centrifugation)	Vendredi	<2h
Anticorps Anti ADN	sérum	Sérum		du lundi au vendredi	<8h
Anticorps anti CCP (peptides citullinés)	sérum	Sérum		mardi, jeudi et samedi	<8h
Anticorps Anti ENA Titrage (anti-ECT), Antigène soluble...	sérum	Sérum	= Ac anti-ENA (RNP, SM, SSA,SSB, Scl70, JO1, CENP, PCNA, centromères, Scl70, histones)	Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi	<8h
Anticorps anti recepteurs de TSH (TRAK)	sérum	Sérum		mardi, jeudi et samedi	<8h
Anticorps anti thyroglobuline	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
Anticorps anti thyroperoxydase (TPO)	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
Anticorps anti-cytoplasme des Polynucléaires neutrophiles	sérum	Sérum		Du lundi au vendredi	<8h
Anticorps anti-nucléaire, facteur anti-nucléaire	sérum	Sérum		Du lundi au vendredi	<8h
Anticorps anti-tissus (LKM, anti-mitochondrie, anti-cytosol, anti muscles lisses et anti-cellules pariétales)	sérum	Sérum		Du lundi au vendredi	<8h
Antidépresseur	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Antithrombine III	Plasma	Citrate	A congeler dans les 24h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<8h
Anti-transglutaminase IgA	sérum	Sérum	Régime "normal" en gluten (pas d'exclusion du gluten de l'alimentation)	Lundi et Jeudi	<8h
Apolipoprotéine A1	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict	Du lundi au samedi	<8h
Apolipoprotéine B	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict	Du lundi au samedi	<8h
ASAT : SGOT	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
B2GP1	sérum	Sérum		Vendredi	<8h
Barbituriques	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Benzodiazépine	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Beta CrossLaps	Plasma	EDTA		mardi, jeudi et samedi	<8h
Béta2microglobuline	Plasma	Héparine gélósé	Pour Lab'Ouest 44 : 2-8°C	Du lundi au samedi	<8h
Bilirubine	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
CA125	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
CA153	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
CA199	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Calcitonine	sérum	Sérum	Centrifuger, décanter et congeler le jour du prélèvement	Du lundi au samedi	<4h
Calcium	urine	Urines	Urines de 24h conservées entre +2 et +8° C, ou recueil sur échantillon	24h / 24h	<6h
Calcium (Calcium corrigé)	Plasma	Héparine gélósé	A jeun non strict	24h / 24h	<8h
Cannabis / Marijuana / Hashish	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Capacité de fixation	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Carbamazépine=tegre tol	Plasma	Héparine gélósé	Avant prise de médicament (noter heure de dernière prise+ posologie) / Pour Lab'Ouest 44: 2-8°C	24h / 24h	<8h
Cardiolipine	sérum	Sérum		Vendredi	<8h
CDT	sérum	Sérum	Sérum non hémolysé ÜSérie lancée tôt le matin : les tubes du jour ne sont pas techniqués !	Mercredi	<8h
Chlore	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<6h
Cholestérol	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict	Du lundi au samedi	<8h
CMV	sérum	Sérum	ÜVoir conditions de prise en charge onglet aide à l'enregistrement	Du lundi au samedi	<8h
Cocaïne	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Coefficient de saturation de la transferrine	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Complément C3	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Complément C4	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Coombs direct	sang total	EDTA	l'identification complète du prélèvement	24h / 24h	<8h
Coombs direct (Ancenis 44)	0	EDTA	l'identification complète du prélèvement	24h / 24h	<8h
Cortisol	Plasma	Héparine gélósé	Le matin entre 7h et 10h sauf mention particulière	Du lundi au samedi	<8h
Cotinine/nicotine	urine	Urines	Pour Lab'Ouest 44 : 2-8°C	24h / 24h	<8h
Créatine Kinase	Plasma	Héparine gélósé	Préciser si médicament type statines	24h / 24h	<8h
Créatinine	urine	Urines		24h / 24h	<8h
Créatinine	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
CRP	Plasma	Héparine gélósé	(Protéine C réactive) Infection? Prévention? Suivi ? Traitement en cours?	24h / 24h	<8h
D dimères	Plasma	Citrate	Urgence : Préciser si dyspnée, douleurs de jambe/mollet - douleur thoracique, autres...	24h / 24h	URGENCE si possible <2h (<6h)
Delta 4 Androstenedione	sérum	Sérum		Mardi	<8h
Digoxine	Plasma	Héparine gélósé	Avant prise du médicament (noter heure de dernière prise+ Posologie) / Pour Lab'Ouest 44: 2-8°C	24h / 24h	<8h
EBV ou MNI test	sérum	Sérum		Du lundi au vendredi	<8h
Électrophorèse des protéines	sérum	Sérum	A jeun non strict (synonyme=EPP)	Du lundi au samedi	<8h
Enzyme de conversion de l'Angiotensine	sérum	Sérum	Prélèvement recommandé à jeun	Jeudi	<8h
Facteur II	Plasma	Citrate	A congeler dans les 24h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Facteur IX	Plasma	Citrate	A congeler dans les 24h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<8h
Facteur V	Plasma	Citrate		24h / 24h	<8h
Facteur VII	Plasma	Citrate	A congeler dans les 24h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<8h
Facteur VIII	Plasma	Citrate	A congeler dans les 6h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<4h
Facteur X	Plasma	Citrate	A congeler dans les 24h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<8h
Facteur XI	Plasma	Citrate	A congeler dans les 48h (double centrifugation)	Mardi et Vendredi	<8h
Facteurs rhumatoïdes	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Fer	Plasma	Héparine gélósé	A jeun non strict : de préférence le matin	Du lundi au samedi	<8h
Ferritine	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Fibrinogene	Plasma	Citrate		24h / 24h	<8h
FSH	Plasma	Héparine gélósé	Préciser le jour du cycle chez la femme et le contexte	Du lundi au samedi	<8h
Gaz du sang	sang total	sang artériel	transport dans la glace si >5min	24h / 24h	<30 min
GGT	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Glucose	Liquide de ponction	Pot stérile		24h / 24h	<8h
Glycémie	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict Centrifugation rapide après prélèvement (code réservé labo)	24h / 24h	NA
Glycémie	sang total	Fluoré	A jeun strict Hyperglycémie : Attention en fonction des sites, la patiente peut être amenée à récupérer le sachet de glucose en pharmacie. Pour l'enregistrement : cf onglet aide à l'enregistrement	24h / 24h	<8h
Glycémie post prandiale	sang total	Fluoré	Prélèvement à réaliser 2h après le début d'un repas copieux	24h / 24h	<8h
Glycorachie	LCR	Pot stérile	Urgence	24h / 24h	<2h
Glycosurie	urine	Urines	Pour recueil de 24h : à conserver entre +2 et +8°C/ U Pour analyse sur Echantillon: Conserver avant analyse entre 2 et 8°C (stabilité max 24h entre recueil et analyse)	24h / 24h	<2h
Groupes	sang total	EDTA	Identification complète sur le tube - antécédents transfusionnels - antécédents grossesses - injection de Rhophylac / t° ambiante	24h / 24h	<8h
Groupe Bébé	sang total	EDTA	Identification complète sur le tube	24h / 24h	<8h
Haptoglobuline	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
HCG quantitatif	Plasma	Héparine gélósé	Préciser date dernières règles chez la femme et contexte	24h / 24h	<8h
HDL/ LDL	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict	24h / 24h	<8h
Hémoglobine glyquée / HBA1C	sang total	EDTA	(=Hémoglobine glycosylée)	Du Lundi au samedi	<8h
Hémoglobine glyquée / HBA1C	sang total	EDTA	(=Hémoglobine glycosylée)	Du lundi au samedi	<8h
Hépatite A	sérum	Sérum	Préciser si vaccination	Du lundi au samedi	<8h
Hépatite A IGM	sérum	Sérum	Code bilan HEPA	Du lundi au samedi	<8h
Hépatite B Ac anti-HbC IgM	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Hépatite B Ac HbC Totaux	sérum	Sérum	Code bilan HEPB=AgHBs+Acanti-HBs+Ac anti-HBc	Du lundi au samedi	<8h
Hépatite B Ac anti-HbS	sérum	Sérum	Préciser si vaccination	Du lundi au samedi	<8h
Hépatite B Ag HbS	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
Hépatite B Ag HbS Femme enceinte	sérum	Sérum	Demande du 6ème mois de grossesse	Du lundi au samedi	<8h
Hépatite C	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
HIV	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
HOMA	sérum	Sérum	Sérum à congeler dans les 4h Ce code génère une demande d'insuline et de glycémie	Mardi et Vendredi	<4h
HSV 1&2 IgG (Herpes)	sérum	Sérum	Remboursé pour femmes enceintes et immunoD / HN sinon	Vendredi	<8h
IgA	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
IgE spécifiques	sérum	Sérum	Température ambiante, cf onglet Allergologie	ÚLundi, Mardi, Jeudi et Vendredi	<8h
IgE totales	sérum	Sérum	Température ambiante	ÚLundi, Mardi, Jeudi et Vendredi	<8h
IGF1 (somatomédine C)	sérum	Sérum	sérum à congeler dans les 8h	Mardi	<4h
IgG	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
IgM	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Immunoélectrophorèse / Immunotypage / Immunofixation	sérum	Sérum	A jeun non strict	Du lundi au samedi	<8h
INR	Plasma	Citrate	Préciser AVK- Posologie - cible thérapeutique	24h / 24h	<8h
Insuline	sérum	Sérum	Sérum à congeler dans les 4h INSU2 : code examen pour un 2ème temps si besoin Si autres temps : créer des dossiers à parts et noter en INFO les temps concernés	Mardi et Vendredi	<4h
Lactates	LCR	Pot stérile		24h / 24h	≤2h à T°C ambiante
Lactates (acide lactique)	Plasma	Fluoré	Urgence Tube fluoré : Ambient (LabOuest49) Tube hepariné : conservation dans la glace et à centrifuger dans les 15min. (LabOuest49) Eviter le garrot; éviter l'exercice physique avant le plvt (sinon repos 30 min avant plvt) !!!!!! Pour LabOuest44: Eurofins	24h / 24h	<15min
LDH	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<4h
LDH	Liquide de ponction	Pot stérile		24h / 24h	<8h
LH	Plasma	Héparine gélósé	Préciser le jour du cycle chez la femme et le contexte	Du lundi au samedi	<8h
Lipase	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Lipase	Liquide de ponction	Pot stérile		24h / 24h	<8h
Lithium	sérum	Sérum	12h après prise du soir ou avant nouvelle prise (taux résiduel) : noter heure de dernière prise+ posologie Pour Lab'Ouest 44 : 2-8°C	Du lundi au samedi	<8h
Lyme (borréliose)	sérum	Sérum		ÚMardi et jeudi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Magnésium plasmatique	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
MDMA ou Extasie (Extasy/Ecstasy)	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Métamphétamines	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ÜContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Microalbuminurie	urine	Urines	Urines de 24h ou échantillon (4h sans miction)	Du lundi au samedi	<8h
MPO (myéloperoxydase)	sérum	Sérum		Mercredi et vendredi	<8h
Myoglobine	Plasma	Héparine gélósé	Pour LabOuest 44 : 2-8°C ÜAucune indication en première intention : privilégier la troponine si suspicion d'infarctus privilégier les CPK suspicion de rhabdomyolyse	24h / 24h	<8h
Na K IONO	urine	Urines		24h / 24h	<8h
NFS	sang total	EDTA	Préciser le cas échéant le type d'hémopathie	24h / 24h	<8h
Orosomucoïde	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
Osmolarité sanguine (osmolalité)	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict (Ücalcul fait à partir du Na, K, Gly, Urée)	24h / 24h	<8h
Osmolarité urinaire (osmolalité)	urine	Urines		24h / 24h	<8h
Paracétamol	Plasma	Héparine gélósé	Dose supposée ingérée Pour Lab'Ouest 49 : A transmettre au CHU d'Angers	24h / 24h	<8h
Parvovirus B19 IgG et IgM	sérum	Sérum		Jeudi	<4h
Phadiatop	sérum	Sérum	Température ambiante	du Lundi au Vendredi	<8h
Phénotype érythrocytaire	sang total	EDTA	Identification complète du prélèvement	24h / 24h	<8h
Phosphatases alcalines	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Phosphore	urine	Urines	Urines de 24h conservées entre +2 et +8° C Acidification des urines	Du lundi au samedi	≤2h à T°C ambiante ≤12h 2°C≤T°C≤8°C
Phosphore	Plasma	Héparine gélósé	A jeun non strict	24h / 24h	<8h
Plaquettes	sang total	EDTA	Préciser si injection HBPM	24h / 24h	<24h
Plaquettes	sang total	Citrate	Préciser si injection HBPM	24h / 24h	<24h
Potassium	urine	Urines	Urines de 24h ou échantillon conservé entre +2 et +8° C	24h / 24h	<8h
Potassium	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<6h
PR3 (protéinase 3)	sérum	Sérum		Mercredi et Vendredi	<8h
Préalbumine	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
Préparation pour IAC	sperme	0	Contactez le laboratoire	Du lundi au samedi	<45min
NT PRO BNP	Plasma	Héparine gélósé	Préciser renseignements cliniques : insuffisance cardiaque ?, dyspnée? , ATCD d'infarctus? traitement par Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion (IEC)?	24h / 24h	<8h
Procalcitonine	Plasma	Héparine gélósé	Urgence - Pour Lab'Ouest 44 : 2-8°C	24h / 24h	<8h
Progestérone	Plasma	Héparine gélósé	Préciser le jour du cycle	Du Lundi au samedi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Pro lactine	Plasma	Héparine gélósé	En journée après 20 minutes de repos et +/- pose de KT (cf. onglet aide à l'enregistrement. Préciser jour du cycle chez la femme et contexte (ne pas doser entre 23h et 7h)	Du lundi au samedi	<8h
Protéïnorachie	LCR	Pot stérile		24h / 24h	<2h
Protéïnurie totale	urine	Urines	Urines 24h ou échantillon, conservé entre +2 et +8° C PROTU : code à utiliser pour les bilans mensuels de femme enceinte	24h / 24h	<8h
Protéïnurie de Bence-Jones	urine	Urines	Vol min 1mL urines 24H ou échantillon/ Envoyer l'urine dans tube neutre code-barres 84	Du lundi au vendredi	<8h
Protides	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Protides	Liquide de ponction	Pot stérile		24h / 24h	<8h
PSA	Plasma	Héparine gélósé	Infection ou traumatisme de la prostate à préciser (toucher rectal, cytoscopie, coloscopie, biopsie transurétrale, traitement au laser, test à l'effort, rétention d'urine)	Du lundi au samedi	<8h
PSA libre	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h
PTH intacte (Parathormone)	sérum	Sérum	Centrifugation rapide du prélèvement	Du lundi au samedi	<6h (sec)
RAI (recherche d'agglutinines irrégulières)	sang total	EDTA	Identification complète sur le tube - Préciser si injection anti-D Rhophylac/ antécédent transfusionnel / t° ambiante	24h / 24h	<24h
RAI urgentes (recherche d'agglutinines irrégulières)	sang total	EDTA	Code utilisable uniquement sur Lab'Ouest 44 Identification complète sur le tube - Préciser si injection anti-D Rhophylac/ antécédent transfusionnel / t° ambiante	24h / 24h	<6h
Recherche de paludisme	sang total	EDTA	urgence : prélèvement au laboratoire si possible. Au pic fébrile, contexte clinique et traitement à préciser - Une demande ne doit jamais être refusée : NC + dérogation si délai non respecté	24h / 24h	URGENCE si possible <2h
Recherche opiacés	urine	Urines	Prélèvement au laboratoire IMPERATIF hors services cliniques ŪContrôle visuel et température échantillon	24h / 24h	<2h
Rénine	Plasma	EDTA	Plasma à congeler < 6h, préciser si position couchée ou debout (depuis au moins 30min) avant le prélèvement. Prélèvement le matin entre 7h et 10h.	Lundi	<4h
Réserve alcaline	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Réticulocytes	sang total	EDTA		24h / 24h	<8h
Rougeole	sérum	Sérum	Préciser si vaccination	Jeudi	<8h
Rubéole IgG	sérum	Sérum	Préciser si vaccination	Du lundi au samedi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Sérologie Chlamydiae trachomatis IgG	sérum	Sérum		ÜLundi, Mercredi et Vendredi	<24h
Sérologie COVID (post-vaccinal, anti S, anti-spike)	sérum	Sérum	Pour Lab'Ouest 44: 2-8°C	Du lundi au samedi	<8h
Sérologie Helicobacter Pylori IgG	sérum	Sérum		Mercredi	<24h
Sérologie Mycoplasme Pneumoniae IgG et IgM	sérum	Sérum		Mercredi	<24h
Sérothèque	sérum	Sérum	1 petit tube sec gel	24h / 24h	<8h
Sodium	urine	Urines	Urines de 24h ou échantillon conservés entre +2 et +8° C	24h / 24h	<8h
Sodium	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Spermogramme	sperme		Contactez le laboratoire : Abstinence de 2 à 7 jours, recueil au labo ou à domicile - A ramener dans les 45 min	Du lundi au vendredi	<45min
Sulfate de DHEA	sérum	Sérum		Mardi	<24h
Syphilis	sérum	Sérum		Du lundi au samedi	<8h
T3 Libre	Plasma	Héparine gélósé	Préciser si traitement associé	Du lundi au samedi	<8h
T4 Libre	Plasma	Héparine gélósé	Préciser si traitement associé	Du lundi au samedi	<8h
TCA	Plasma	Citrate	*Prél entre 2 injec. Si traitement Hép. SC - préciser le traitement *Sans importance si héparine IV à la pompe - Préciser le traitement	24h / 24h	<6h (<2h si traitement par HNF)
TCK	Plasma	Citrate		24h / 24h	<6h
Test Migration Survie	sperme		Contactez le laboratoire	Du lundi au vendredi	<45min
Test Post Coïtal	sperme		Contactez le laboratoire	Du lundi au samedi	<45min
Testostérone homme/femme/enfant	Plasma	Héparine gélósé	Préciser le contexte	Du lundi au samedi	<8h
Thyroglobuline	Plasma	Héparine gélósé	Pour Lab'Ouest 44: 2-8°C	Du lundi au samedi	<8h
Toxoplasmose	sérum	Sérum	Préciser si grossesse et date de début de grossesse	Du lundi au samedi	<8h
TP	Plasma	Citrate	Préciser si traitement par nouveaux anticoagulants ou si troubles hépatiques	24h / 24h	<8h
Transferrine	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<8h
Triglycérides	Plasma	Héparine gélósé	A jeun strict	24h / 24h	<8h
Trophatop	sérum	Sérum	Température ambiante	du Lundi au Vendredi	<8h
Troponine	Plasma	Héparine gélósé	Urgence : préciser si douleurs thoraciques, douleurs autres, dyspnée (essoufflement), ECG récent	24h / 24h	URGENCE si possible <2h (<6h)
TSH	Plasma	Héparine gélósé	Préciser si traitement associé	Du lundi au samedi	<24h
Urée	urine	Urines		24h / 24h	≤2h à T°C ambiante ≤12h 2°C≤T°C≤8°C
Urée	Plasma	Héparine gélósé		24h / 24h	<24h (sec) ≤ 8h (hépariné)
VDRL	sérum	Sérum	Pour Lab'Ouest 44: 2-8°C	Du lundi au vendredi	<8h
Vitamine B12	Plasma	Héparine gélósé		Du lundi au samedi	<8h

Analyses	Nature	Tube à prelever	Consignes préanalytiques	Fréquence	Delai d'acheminement au laboratoire à T° ambiante (15-25°C)
Vitamine D total	sérum	Sérum	Selon HAS règles de remboursement strictes - préciser si supplémentation dans les 3 mois. Conditions de prise en charge : suspicion de rachitisme, ostéomalacie, patients de plus de 70 ans, chirurgie bariatrique, indications AMM de certains médicaments, suivi de greffe rénale.	Du lundi au vendredi	<8h
Vitesse de Sédimentation	sang total	EDTA	A jeun non strict	24h / 24h	<8h
Volume des 24 h	urine	Urines	A transmettre au laboratoire dans les 2 heures suivant la fin du recueil et entre +2 et +8° C	24h / 24h	≤2h à 2°C≤T°C≤8°C
von Willebrand Factor (facteur Willebrand) : Antigène et activité cofacteur de la ristocétine (RCO)	plasma	Citrate	A congeler dans les 6h (double centrifugation). Préciser si possible la date de l'intervention, le groupe sanguin, les antécédents personnels et familiaux de saignements. ÜComprend le FAC8 de base.	Mardi et Vendredi	<4h
VZV IgG (varicelle - zona)	sérum	Sérum	En urgence si femme enceinte et notion de contage récent! Prévenir le poste biospé d' Ancenis	ÜMardi et Vendredi	<8h
Western Blot EBV	sérum	Sérum		Lundi, Mardi et Jeudi	<8h
Western Blot Lyme IgG	sérum	Sérum		Lundi, Mardi et Jeudi	<8h
Western Blot Lyme IgM	sérum	Sérum		Lundi, Mardi et Jeudi	<8h